

Type II










TS EN 14683

Type IIR

NEOMASK®

EN 14683
TESTED METHOD
BAKTERİ
FİLTRELASYONU
%98,8

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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www.neomaske.com

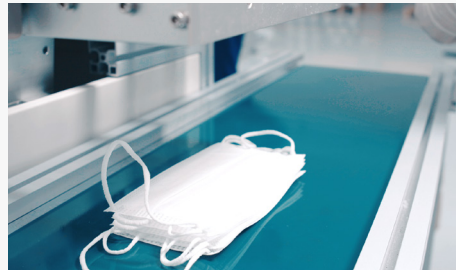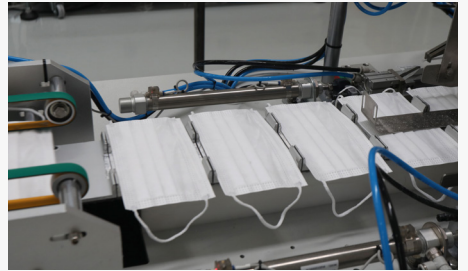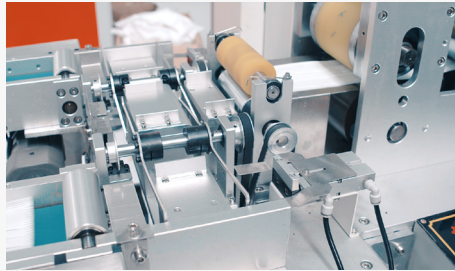




Hakkımızda

Firmamız Safi Medikal Tekstil Sanayi adı altında maske üretimimiz gerçekleştirilmektedir. 80 kişilik ekibimiz günlük **600.000** adet kapasite ile tam hijyen koşullarında ve Avrupa standartlarına uygun NEOMASK markası adıyla Full Ultrasonik Maske üretmektedir. Lastikli cerrahi maske olan NEOMASK alerji yapmayan, lateks içermeyen, %98,8 bakteri filtrelasyonu, esnek yapısı ve kulaklara uyumlu lastikleri ile kullanımınıza sunulmuştur. 3 kat nonwoven teknolojisi ve hava geçirgen yapısı ile NEOMASK tek kullanımlıdır.



100 MM PE Alüminyum Tel

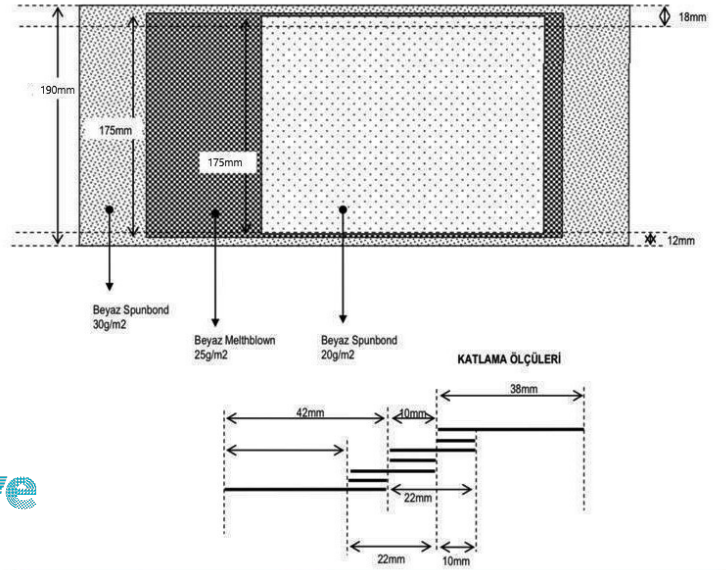


ÜRÜN FORMÜLÜ
20gsm SPUNBOND
25gsm MELTBLOWN
30gsm SPUNBOND



Product Specifications	
Color: White	
3 PLY	
Non-woven	
170 (±1)mm X 90 (±1) mm	
Earloop – 20cm	
Wired	
Polipropilene	
Non-Sterile	
Single use	
Easy breathing	
Latex free	
Skin friendly	

TERMS	
MOQ	500.000 masks
Lead Time After PO Approval	5 working days
Payment Terms	50% on PO Approval, 50% on shipment approval
Incoterm	EXW
Meets Minimum Performance Requirements According to EN 14683	
Bacterial Filtration Efficiency	> % 98,8
Breathing Resistance (Pa/cm²)	< 32,9
Splash Resistance (mmHg)	21,3


Packaging Specifications	
Masks in a Box	50
Box Dimensions (cm)	10 W x 18 L x 10 H
Box Weight (kg)	0,18
Box in a Carton	40 (2.000 masks)
Carton Dimensions (cm)	40W x 60L x 40H
Carton Weight (kg)	8,00
Pallet T1 x H1 (80x120 pallet)	4 x 5 = 20 (40.000 masks)
Pallet Dimensions (cm)	80W x 120L x 215H
Pallet Weight (kg)	160
20' DC Container Pallet Load	11 pallet (440.000 masks)
40' DC Container Pallet Load	23 pallet (920.000 masks)
Full Track Floor Load	700 cases (1.400.000 masks)

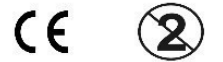

CERTIFICATION	
CE	
EN 14683	
ISO 9001:2015	
ISO 18001:2007	
ISO 13485:2016	

EN 14683
TESTED METHOD
**BAKTERİ
FİLTRELASYONU
%98,8**

NEOMASK®
TYPE IIR

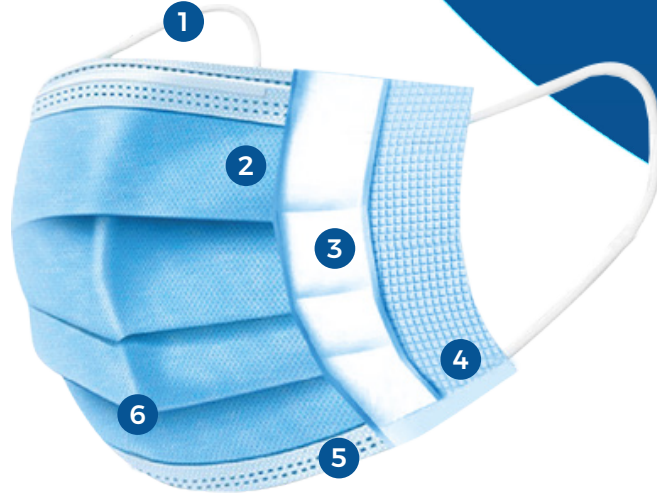

3 KATMANLI KORUMA

1- ELASTİK KULAK HALKALARI

Kolay ve rahat

2- ÜST FİLTRE KATMANI

Toz, mikrop ve sıvılar için neme dayanıklı dokuma olmayan PP filtre katmanı (**Spunbond**)

3- ORTA FİLTRE KATMANI

Yüksek yoğunluklu eritilerek şişirilmiş PU, düşük solunum direncine sahip küçük ıslak ve kuru parçacıklar için üstün filtreleme sağlar. (**Meltblown**)

4- YUMUŞAK KONFOR KATMANI

Hipoalerjenik yumuşak yüzey tabakası filtrelenmiş hava sağlar ve cilt tahrişini önler. (**Spunbond**)

5- GÜÇLÜ ULTRASONİK BAĞLI KENAR

6- ERGONOMİK YÜZEY KATLAMA



TYPE IIR

ÜRÜN FORMÜLÜ

Sağlık personeli ve hastalar için bulaşıcı hastalıklara karşı koruma

Tıbbi yüz maskesi, Tip IIR - EN14683, özellikleri şunlardır:

- Kulak halkalı veya bağcıklı plili stil
- Üç koruyucu katmanla koruma
- Kan ve vücut sıvılarına karşı sıçramaya dayanıklı katman koruması
- Çeşitli renk ve stillerde mevcuttur

Tıbbi yüz maskeleri, kullanıcının dışarı attığı büyük partiküllerin (ör. tükürük, mukus) hasta veya çalışma ortamına ulaşmasını önlemeye ve kullanıcının, hasta veya iş ortamı kaynaklı kan ve/veya vücut sıvılarına maruz kalmaktan korunmasına yardımcı olur.

Tip IIR - EN14683 maskeler, hasta veya iş ortamı kaynaklı kan ve/veya vücut sıvılarının sağlık hizmetleri çalışanı için risk oluşturduğu durumlar için uygundur.





TEMEL ENDÜSTRİLER

Sağlık Hizmetleri



TS EN 14683



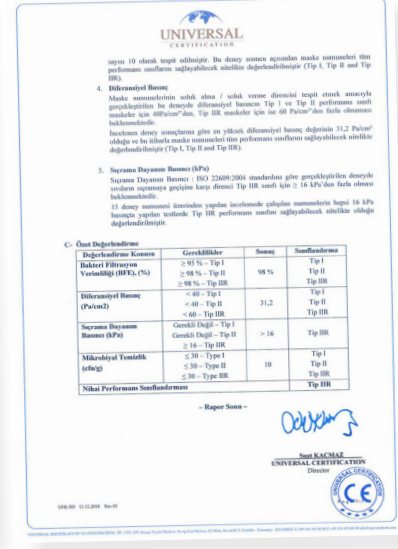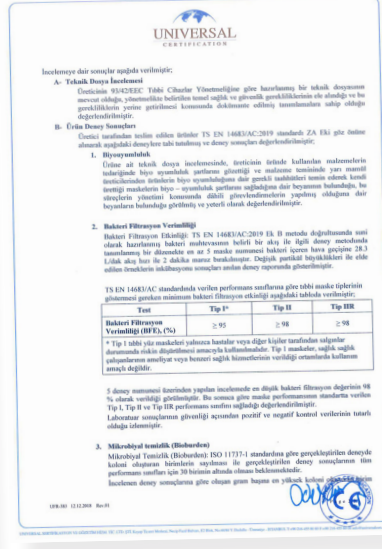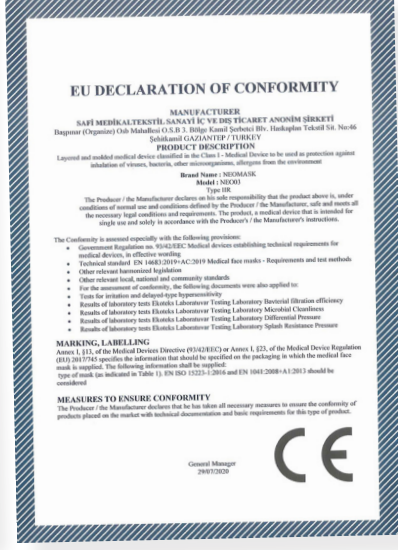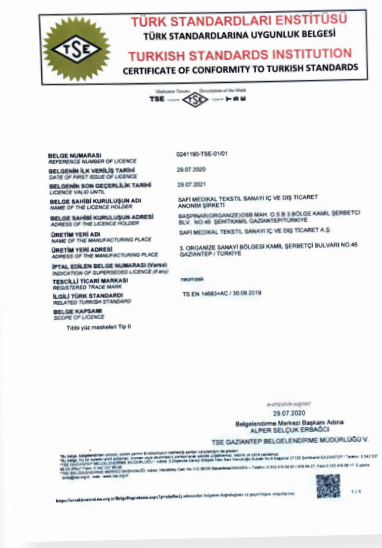

EN 14683
TESTED METHOD
BFE
%98,8

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TEST REPORT
DENET RAPORU

20020415
06-20

SAĞ MEDİKAL TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

Adresi: 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAMİL İBİRCİTÇİ BULVARI NO:46
TİNE GAZİANTEP BELEĞENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ/İBRAHİM AÇAR
Alınan firma: ŞEYMA AÇARDAŞ

İçerik tipi: -
İçerik numarası: -
Model numarası: -
Numaralanmış adı ve tarihi: Boyuz maskesi
Numaralanmış kabul tarihi: 20.06.2020
Bunu numune verene ilettiği tarih ve tarihi: 20.06.2020-20.06.2020
Deneyin yapıldığı tarihi: -

Açıklamalar: Bu raporla verilen sonuçlar enjeksiyon tarafından gönderilen numuneye aittir.

Numune alanı: -
Numuneye nasıl ulaştırıldı: -
Yaklaşık ölçümleri: Belirtilmedi.
Raporun sayfa sayısı: 4

Mikro: -
Mikro: -
Laboratuvar Müdürü: -
Sertifika: -

Bu rapor, laboratuvarımız tarafından çıkarılmış olup, geçerliliği ve doğruluğu raporun altına yazılmıştır.

Sayfa 1 / 4

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL TEMİZLİK (BİYÖYÜK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)
EN ISO 11737-1:2018 (TS EN ISO 11737-1:2018) (*)

5 numune değerlendirildi. Numune miktarı ve test çözeltisi (örneğin 250 rpm de 5 dk) ve uygun koşullarda edildi. Toplam sonuçlar aşağıdaki gibidir: 10 dk ve 15 dk için test: 20-25 °C de 7 gün mikrobisyon sonrası aşağıdaki mikrobisyonlar sayılır ve toplam sonuç verilir. Ortalama sonuç verilir.

SONUÇ	İTİFEN
Mikrobiyal Temizlik (koloniy)	10 koloniy

BASINÇ FARKI (NEFES ALABİLİRLİK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)

Test Koşulları: Numune miktarı ve sıcaklığı: (21 ± 5) °C ve (85 ± 5) % bağıl nem, 4 saat.
2,5 cm çaplı 5 farklı deney numunesi alındı.
8 dk hava akışı uygulandı.
Fark Basınç Manometresi üzerinden okunan basınç farkı değeri (Pa) (Pascal) olarak kaydedildi.

NUMUNE	BASINÇ FARKI SONUÇ	İTİFEN
1	33.0 Pa/cm ²	< 40 Pa/cm ² %100 başarı
2	31.3 Pa/cm ²	
3	31.4 Pa/cm ²	
4	33.9 Pa/cm ²	
5	34.1 Pa/cm ²	
Ortalama Sonuç	32.9 Pa/cm ²	

Sayfa 4 / 4

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL TEMİZLİK (BİYÖYÜK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)
EN ISO 11737-1:2018 (TS EN ISO 11737-1:2018) (*)

5 numune değerlendirildi. Numune miktarı ve test çözeltisi (örneğin 250 rpm de 5 dk) ve uygun koşullarda edildi. Toplam sonuçlar aşağıdaki gibidir: 10 dk ve 15 dk için test: 20-25 °C de 7 gün mikrobisyon sonrası aşağıdaki mikrobisyonlar sayılır ve toplam sonuç verilir. Ortalama sonuç verilir.

SONUÇ	İTİFEN
Mikrobiyal Temizlik (koloniy)	10 koloniy

BASINÇ FARKI (NEFES ALABİLİRLİK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)

Test Koşulları: Numune miktarı ve sıcaklığı: (21 ± 5) °C ve (85 ± 5) % bağıl nem, 4 saat.
2,5 cm çaplı 5 farklı deney numunesi alındı.
8 dk hava akışı uygulandı.
Fark Basınç Manometresi üzerinden okunan basınç farkı değeri (Pa) (Pascal) olarak kaydedildi.

NUMUNE	BASINÇ FARKI SONUÇ	İTİFEN
1	33.0 Pa/cm ²	< 40 Pa/cm ² %100 başarı
2	31.3 Pa/cm ²	
3	31.4 Pa/cm ²	
4	33.9 Pa/cm ²	
5	34.1 Pa/cm ²	
Ortalama Sonuç	32.9 Pa/cm ²	

Sayfa 4 / 4

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL TEMİZLİK (BİYÖYÜK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)
EN ISO 11737-1:2018 (TS EN ISO 11737-1:2018) (*)

5 numune değerlendirildi. Numune miktarı ve test çözeltisi (örneğin 250 rpm de 5 dk) ve uygun koşullarda edildi. Toplam sonuçlar aşağıdaki gibidir: 10 dk ve 15 dk için test: 20-25 °C de 7 gün mikrobisyon sonrası aşağıdaki mikrobisyonlar sayılır ve toplam sonuç verilir. Ortalama sonuç verilir.

SONUÇ	İTİFEN
Mikrobiyal Temizlik (koloniy)	10 koloniy

BASINÇ FARKI (NEFES ALABİLİRLİK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)

Test Koşulları: Numune miktarı ve sıcaklığı: (21 ± 5) °C ve (85 ± 5) % bağıl nem, 4 saat.
2,5 cm çaplı 5 farklı deney numunesi alındı.
8 dk hava akışı uygulandı.
Fark Basınç Manometresi üzerinden okunan basınç farkı değeri (Pa) (Pascal) olarak kaydedildi.

NUMUNE	BASINÇ FARKI SONUÇ	İTİFEN
1	33.0 Pa/cm ²	< 40 Pa/cm ² %100 başarı
2	31.3 Pa/cm ²	
3	31.4 Pa/cm ²	
4	33.9 Pa/cm ²	
5	34.1 Pa/cm ²	
Ortalama Sonuç	32.9 Pa/cm ²	

Sayfa 4 / 4

TYPE II

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TEST REPORT
DENET RAPORU

20020222
07-20

SAĞ MEDİKAL TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

Adresi: BASINLAR (SİG) OSB MAH. O.S.B. 3. BÖLGE KAMİL İBİRCİTÇİ BULVARI NO:46
TİNE GAZİANTEP BELEĞENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ/İBRAHİM AÇAR
Alınan firma: ŞEYMA AÇARDAŞ

İçerik tipi: -
İçerik numarası: -
Model numarası: -
Numaralanmış adı ve tarihi: NeutMask/White mask.
Numaralanmış kabul tarihi: 30.06.2020
Bunu numune verene ilettiği tarih ve tarihi: 30.06.2020-01.07.2020
Deneyin yapıldığı tarihi: -

Açıklamalar: Bu raporla verilen sonuçlar enjeksiyon tarafından gönderilen numuneye aittir.

Numune alanı: -
Numuneye nasıl ulaştırıldı: -
Yaklaşık ölçümleri: Belirtilmedi.
Raporun sayfa sayısı: 3

Mikro: -
Mikro: -
Laboratuvar Müdürü: -
Sertifika: -

Bu rapor, laboratuvarımız tarafından çıkarılmış olup, geçerliliği ve doğruluğu raporun altına yazılmıştır.

Sayfa 1 / 3

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL TEMİZLİK (BİYÖYÜK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)
EN ISO 11737-1:2018 (TS EN ISO 11737-1:2018) (*)

5 numune değerlendirildi. Numune miktarı ve test çözeltisi (örneğin 250 rpm de 5 dk) ve uygun koşullarda edildi. Toplam sonuçlar aşağıdaki gibidir: 10 dk ve 15 dk için test: 20-25 °C de 7 gün mikrobisyon sonrası aşağıdaki mikrobisyonlar sayılır ve toplam sonuç verilir. Ortalama sonuç verilir.

SONUÇ	İTİFEN
Mikrobiyal Temizlik (koloniy)	10 koloniy

BASINÇ FARKI (NEFES ALABİLİRLİK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)

Test Koşulları: Numune miktarı ve sıcaklığı: (21 ± 5) °C ve (85 ± 5) % bağıl nem, 4 saat.
2,5 cm çaplı 5 farklı deney numunesi alındı.
8 dk hava akışı uygulandı.
Fark Basınç Manometresi üzerinden okunan basınç farkı değeri (Pa) (Pascal) olarak kaydedildi.

NUMUNE	BASINÇ FARKI SONUÇ	İTİFEN
1	33.0 Pa/cm ²	< 40 Pa/cm ² %100 başarı
2	31.3 Pa/cm ²	
3	31.4 Pa/cm ²	
4	33.9 Pa/cm ²	
5	34.1 Pa/cm ²	
Ortalama Sonuç	32.9 Pa/cm ²	

Sayfa 4 / 4

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

TEST SONUÇLARI

MİKROBİYAL TEMİZLİK (BİYÖYÜK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)
EN ISO 11737-1:2018 (TS EN ISO 11737-1:2018) (*)

5 numune değerlendirildi. Numune miktarı ve test çözeltisi (örneğin 250 rpm de 5 dk) ve uygun koşullarda edildi. Toplam sonuçlar aşağıdaki gibidir: 10 dk ve 15 dk için test: 20-25 °C de 7 gün mikrobisyon sonrası aşağıdaki mikrobisyonlar sayılır ve toplam sonuç verilir. Ortalama sonuç verilir.

SONUÇ	İTİFEN
Mikrobiyal Temizlik (koloniy)	10 koloniy

BASINÇ FARKI (NEFES ALABİLİRLİK)

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019) EK-C (*)

Test Koşulları: Numune miktarı ve sıcaklığı: (21 ± 5) °C ve (85 ± 5) % bağıl nem, 4 saat.
2,5 cm çaplı 5 farklı deney numunesi alındı.
8 dk hava akışı uygulandı.
Fark Basınç Manometresi üzerinden okunan basınç farkı değeri (Pa) (Pascal) olarak kaydedildi.

NUMUNE	BASINÇ FARKI SONUÇ	İTİFEN
1	33.0 Pa/cm ²	< 40 Pa/cm ² %100 başarı
2	31.3 Pa/cm ²	
3	31.4 Pa/cm ²	
4	33.9 Pa/cm ²	
5	34.1 Pa/cm ²	
Ortalama Sonuç	32.9 Pa/cm ²	

Sayfa 4 / 4

TYPE IIR



A: 3. Org San. Böl.
Kamil Şerbetçi Blv. No:46
Şehitkamil | Gaziantep | TURKEY

Ş: Salacak Mah.
Öğdül Sok. Kız Kulesi Konakları No. 29-33 B2 / 1
Üsküdar | İstanbul | TURKEY

T: +90 (342) 360 28 28
+90 (216) 553 55 15

info@neomaske.com
www.neomaske.com